

# ESTROTECT™

## Návod k použití:

1. Samolepky před použitím držíme v teple.  
(alespoň 37°C, aktivace lepidla)



2. Místo pro aplikaci okartáčujeme a  
otřeme utěrkou (přiloženy v balení).



3. Samolepku přilepíme.  
(u jalovic doporučuji přidat extra lepidlo)



4. Důkladně uhladíme.



5. Připraveno k aktivaci.



6. Aktivace.



7. Kontrolujeme minimálně 2x denně a zapouštíme až po úplném objevení se flourescentní barvy.

Pokud potřebujete jakoukoliv další radu, neváhejte mě prosím kontaktovat:

MVDr. Martin Vlček

Tel.: 775 972 909, E-mail: [estrotect@seznam.cz](mailto:estrotect@seznam.cz)